

薬用 アセプジー スプレイヤー（噴霧装置）

- ご使用の前に本書を必ずお読みください。
- 本器にはレフィルポンペは同梱されておりません。
- ポンペは専用の「アセプジーレフィルAS-400」を使用して下さい。

＜安全にご使用いただくために＞

- 下記に示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、あなた自身や他の人々への危害あるいは財産等への損害を未然に防止するための表示です。いずれも安全に関する重要な内容ですので、お読みになり、よく理解して、必ず指示に従ってください。



警告

この表示の注意事項を守らないと、死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。



禁止




警告


- 火気あるいは化学物質がある所で使用しない。




- 直射日光の当たる所で使用はしない。

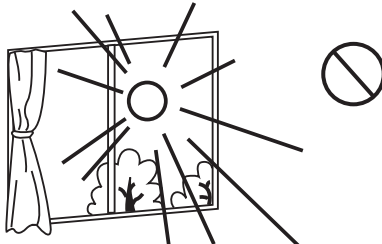


- タバコやドライヤーなどの火気・高温になるものを本器のそばで使用しない。

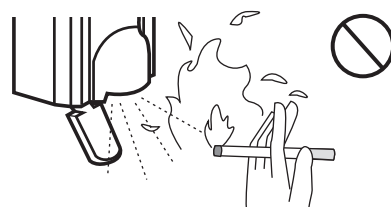


- 著しく高温の場所での使用はしない。

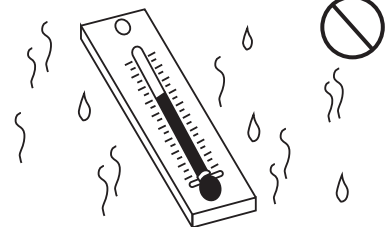

- 家電製品のそばで使用しない。

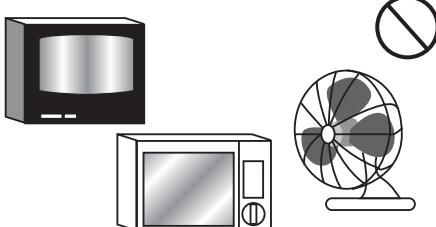


- 噴霧口を覗かない。

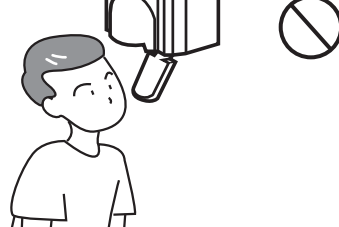

注意


- アルコールや水分等により変質、劣化の可能性がある壁材・床材・家具・製品のそばで使用しない。

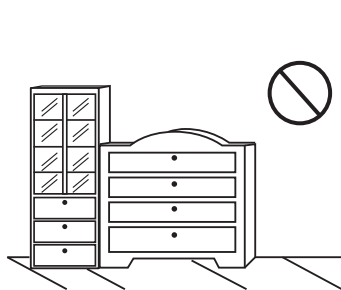


- 使用しにくい場所や、人の出入り・移動の妨げになるような場所、またフライヤーのそばには設置しない。



- 本体の上や下に物を置いたり、掛けたりしない。

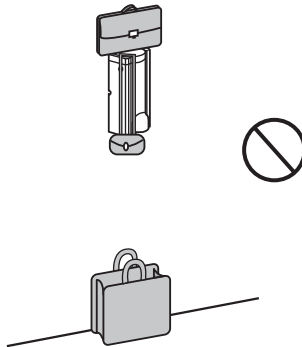

- レバーを引っ張ったり、無理に押し

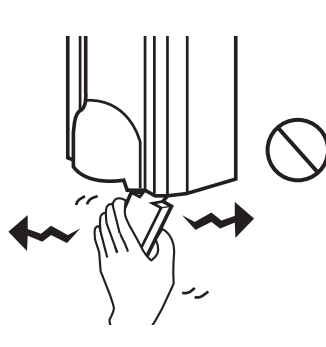

保証書（保証期間/ 製造より3年）

問い合わせ先：エレス（株） 03-6809-0320

- この度は、ハンドアセプジーをお買い上げ戴きましてまことにありがとうございます。保証期間内に正常な使用状態で使用していて故障した場合には本保証書記載内容に基づき無料修理致します。但し、消耗品及び付属品は除きます。
- 保証期間内でも次のような場合は有料修理になります。
 - (1) 本保証書をご提示されないとき
 - (2) 本保証書の所定事項の未記入、文字を書き換えられたもの
 - (3) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷のとき
 - (4) 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障及び損傷のとき
 - (5) 改造またはご使用の責任に帰すと認められる故障及び損傷のとき
- 修理を依頼される場合はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。やむを得ず送付される場合は送料をご負担ください。
- 本保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保存してください。



販売店名及び取扱店名

御購入日 年 月 日




1. 設置方法

- ① この説明書の表(裏面)の注意事項をよく読み、適当な設置場所を選定します。
* 注意: 壁材、床材、その他周囲のものがアルコールに強いものか確認してから設置してください。
- ② 設置の高さは床から1メートル前後が適当ですが、手でレバーを押すのに適切な余白と高さにしてください。
- ③ 本体裏に装着されているブラケット(壁掛けハンガー)をリリースボタンを押しながら本体に対して下方へスライドさせて外します。
- ④ 本体を取り付ける位置にブラケットをネジでしっかりと、取り付けます。
* 注意: ネジが使用できない場合は、ブラケット(プラスチック)と壁の素材にあった接着剤等で固定します。
ハンドアセブジーはポンペを入れると1kg以上となります、ネジ止め以外での固定で本体が壁より外れて落下した場合は保証の適用外となりますので注意してください。
- ⑤ ブラケットがしっかりと固定されましたら、本体をブラケットより約10cm程上へ上げてから、ブラケットに合わせ下へスライドさせて固定します。
本体の側面とブラケットの側面を合わせながら、本体下部がブラケット中心の突起部の下側とほぼ一致する程度(約10cm)に上げて合わせます。そのまま本体を下方へスライドすると、ブラケットに固定されます。
- ⑥ 移設などで本体を外す時は、左側のリリースボタンを押しながら本体を上へ上げて取り外します。

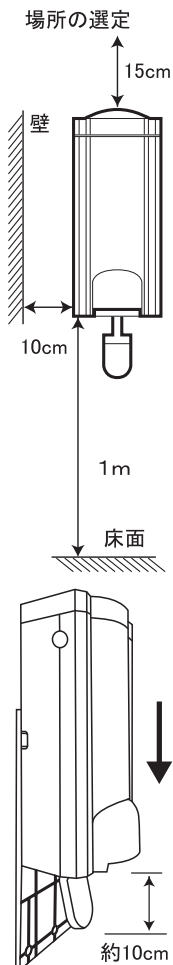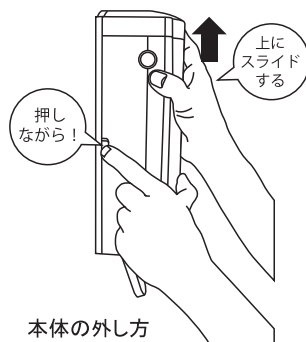

各部名称及び仕様

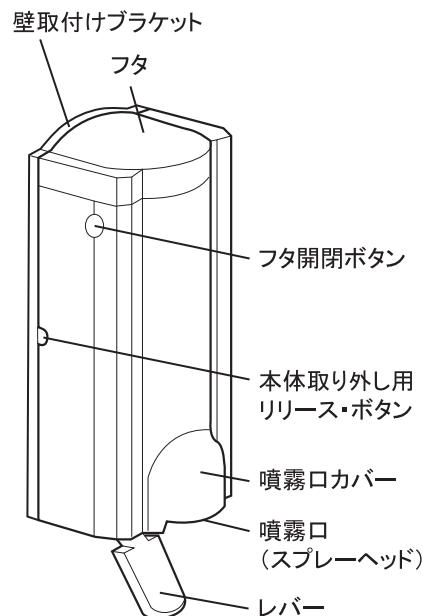


<仕様>
形 式: HA-1112
名 称: ハンドアセブジー
使用ポンペ: 専用アセブジーレフィル
AS-400 (400ml)
サ イ ズ: 358(H) x 118(W) x 108(D) mm
重 量: 約665g(本体のみ)
約440g(ポンペ)




2. レフィルポンペの装着・交換

- ① 本体左側上部にあるボタンを押しながらフタを開きます。(レフィルポンペの交換の場合は、装着されているポンペを抜き取ります。)
- ② 新しいアセブジーレフィルポンペのキャップを外して、逆さまにして本体に差し入れます。
- ③ ポンペの底部を回して最後までしっかり挿入されたかを確認します。
- ④ フタをしっかりと閉じます。
* 注意:
ハンドアセブジーには専用のアセブジーレフィル(AS-400)以外は使用できません。
絶対に他のポンペ等の中に入れないでください。

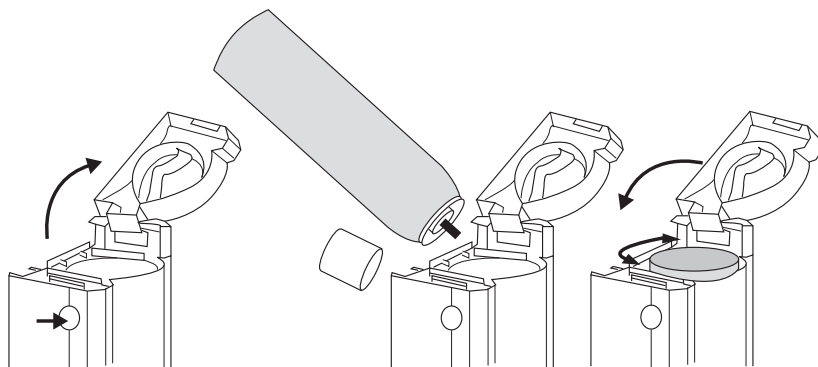

3. 使用方法

- ① 本体下部のレバーを壁側へ指で押します。
- ② 噴霧口よりアセブジー液がスプレーされます。
- ③ スプレーは約1秒で1ccが噴霧されます。
手指の消毒は約1ccで充分です。
* 注意: あまり強くレバーを押したり、引いたりしないでください。噴霧されなくなったらポンペを交換してください。また噴霧液がたれ落ちる程大量には噴霧しないようにしてください。

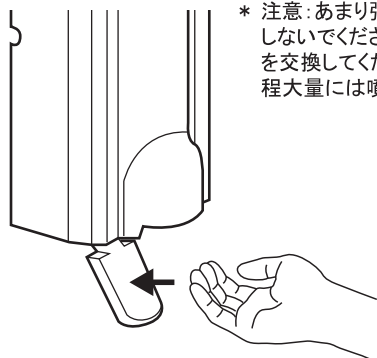

4. 日常のお手入れ

- 衛生のため噴霧口の周辺は汚れが残らない様に常に拭いておきましょう。
- 噴霧された霧状のアルコール及び内溶液は周囲の壁、あるいは床などに付着する可能性があります。周囲の壁、床はこまめに掃除するようにしてください。
- アルコールなどに影響を受ける壁材や床材の場合は、カバーするようにしてください。

